


► Μηνύματα λάθους και αντιμετώπιση προβλημάτων

[Error 1]



Η ταινία μέτρησης είναι χρησιμοποιημένη.
Χρησιμοποιήστε μια καινούρια ταινία μέτρησης.

[Error 3]

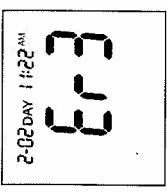

Θερμοκρασία εκτός του εύρους λειτουργίας του μετρητή.
Επαναλάβετε την μέτρηση σε περιβάλλον εντός του εύρους λειτουργίας του μετρητή (10~40)°C, μετά από 30 λεπτά.

[Error 4]



Η ταινία μέτρησης ίσως δεν είναι επαρκώς γεμισμένη λόγω υψηλής γλυκόζης ή ανεπαρκούς ποσότητας δειγματος. Επαναλάβετε την μέτρηση με μια καινούρια ταινία μέτρησης και επαρκή ποσότητα δειγματος. Αν το πρόβλημα επαναληφθεί, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.

► Ο μετρητής δεν ενεργοποιείται με την εισαγωγή ταινίας.


- Η ταινία μέτρησης (ίσως δεν έχει εισαχθεί σωστά ή ολόκληρη).
- Βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής δουλεύει πατώντας το κουμπί M.
- Εάν ο μετρητής δεν λειτουργεί, αντικαταστήστε την μπαταρία.

► Τα αποτελέσματα της μέτρησης δεν είναι τα αναμενόμενα.

- Βεβαιωθείτε ότι το δείγμα αίματος τοποθετήθηκε εγκαίρως.
- Πάρτε δείγμα αίματος από διαφορετικό δάκτυλο.
- Επαναλάβετε την μέτρηση με μια καινούρια ταινία μέτρησης.




ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

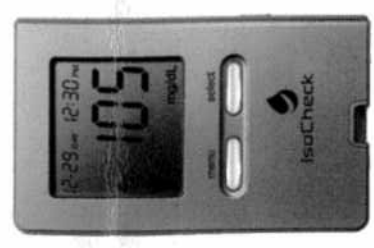


Σύστημα μέτρησης σακχάρου αίματος

► Προετοιμασία του στυλό λήψης δείγματος αίματος


1) Ξεβιδώστε το καπάκι της συσκευής .

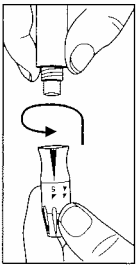


2) Με προσοχή εισάγετε την καινούρια βελόνα στον υποδοχέα και περιστρέψτε για να τραβήξετε το προστατευτικό κάλυμμα .

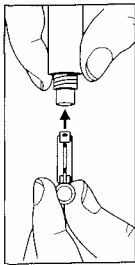

3) Ρυθμίστε το βάθος τρυπήματος από 1 έως 5 (1-5) .

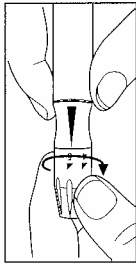

4) Τοποθετήστε το καπάκι της συσκευής τρυπήματος.

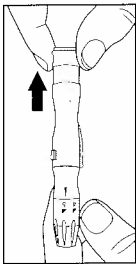


► Προετοιμασία μετρητή

1) Εισάγετε μια ταινία μέτρησης στην υποδοχή του μετρητή προσεκτικά, μέχρι να ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση .



2) Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο με την σταγόνα αίματος για να αρχίσετε την μέτρηση.

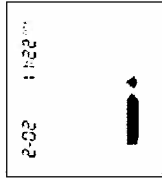


► Συλλογή δείγμα αίματος & Μέτρηση

3) Κρατήστε το στυλό λήψης αίματος σταθερά στην πλευρά του δακτύλου σας. Πατήστε το κουμπί εκπομπής της βελόνας .



4) Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο με την σταγόνα αίματος ,αγγίξτε και κρατήστε την σταγόνα στο στενό κάτω άκρο της ταινίας ,έως όπου να ακουστεί η ηχητική επιβεβαίωση .

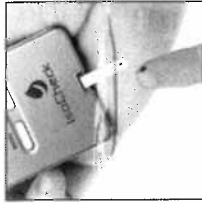

5) Ο μετρητής θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση από το 5 έως το 1 . Τα αποτελέσματα μέτρησης του σακχάρου αποθηκεύονται αυτόματα στην μνήμη του μετρητή .




► Αποτελέσματα μέτρησης σακχάρου αίματος

Ο μετρητής IsoCHECK εμφανίζει αποτελέσματα από 20 έως 600 mg/dl(1.1-33.3 mmol/l).

[HI] Μήνυμα

Αν το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι υψηλότερο από 600 mg/dl (33.3 mmol/L), θα εμφανιστεί στην οθόνη του μετρητή η ένδειξη [HI].

Αυτό υποδεικνύει σοβαρή υπεργλυκαιμία (υψηλό επίπεδο γλυκόζης αίματος).

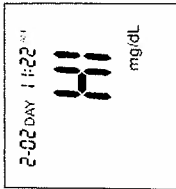

[LO] Μήνυμα

Αν το αποτέλεσμα μέτρησης είναι χαμηλότερο από 20 mg/dl (1.1 mmol/L) θα εμφανιστεί στην οθόνη του μετρητή η ένδειξη LO .

Αυτό υποδεικνύει σοβαρή υπογλυκαιμία (χαμηλό επίπεδο γλυκόζης αίματος).

